

Pill Straw



Produktinformation

Ref. nr	Namn	Färg	Diameter Top	Diameter Bottom	Höjd
300700	ECO+ Pill straw i kartong 2-p	Blå	Yttre: 14 mm Innre: 11,3 mm	Yttre: 9 mm Innre: 7 mm	110 mm
300701	ECO+ Pill straw i påse 10-p	Blå	Yttre: 14 mm Innre: 11,3 mm	Yttre: 9 mm Innre: 7 mm	110 mm

Förpackning

Ref. nr	Innerförpackning	Ytterförpackning	Kartonger per pall	Innerförpackningsstorlek mm	Ytterförpackningsstorlek mm	Förpackningshöjd cm	Pallhöjd cm	Kartongvikt	Pallvikt	GTIN
300700	2 st	20 st	240 st	160x50x20	180x130x120	120	1 040	0,2 kg	63 kg	7340077902115
300701	10 st	80 st	240 st	200x120x30	180x130x120	120	1 040	0,3 kg	87 kg	7340077902122

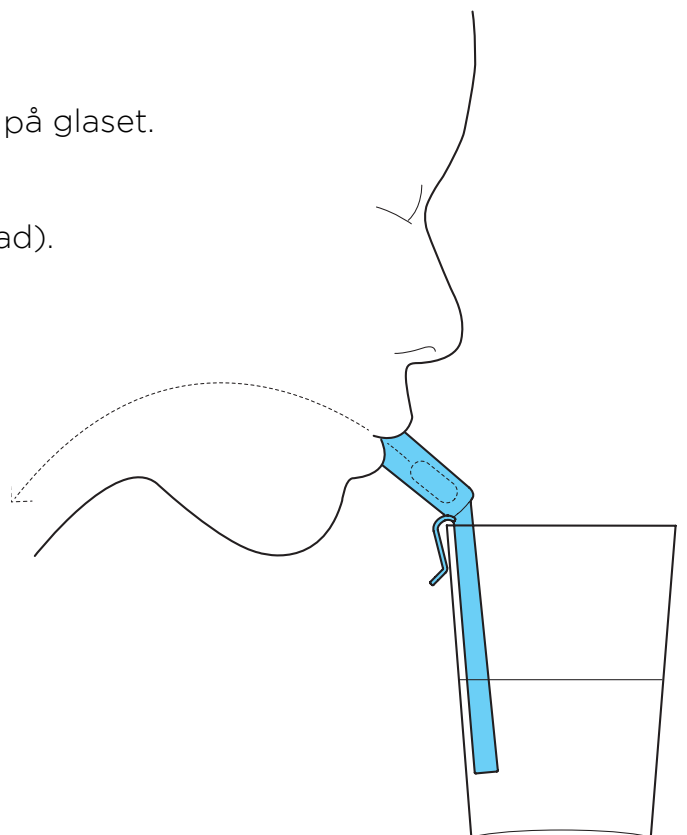
Information

Pill straw underlättar intaget av tabletter.



- Lägg tabletten i sugröret och placera sugöret på glaset.
- En klämma håller sugröret på plats på glaset.
- Kan användas flera gånger.
- Biocirkulär råvara (ISCC massbalans-attribuerad).

För att säkerställa en hög standard av renlighet och användarvänlighet rekommenderar vi följande rengöringsinstruktioner:

- Efter användning, se till att Pill Straw rengörs noggrant för att avlägsna eventuella rester.
- Pill Straw kan diskas i diskmaskin vid 60°C.
- Använd standarddiskmedel och desinfektionsmedel för bästa resultat.
- Efter maskindiskning, skölj noggrant ur sugröret med rent vatten för att säkerställa att inga rester av maskindiskmedel finns kvar inuti.



Etiketter

HpmTM
For better care!

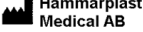
Pill Straw 2-p
Blå
Pill Straw 2-p
Blue


Pcs/Antal: 10x2 pcs

REF 300700



LOT 240821

Vers: 01/2023-09


Hammarplast Medical AB
Kartåsgatan 8, SE-531 40
Lidköping, Sweden
www.hpm.se, info@hpm.se


37340077902116

EID032

HpmTM
For better care!

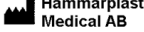
Pill Straw 10-p
Blå
Pill Straw 10-p
Blue


Pcs/Antal: 8x10 pcs

REF 300701

LOT 240821

Vers: 01/2023-09


Hammarplast Medical AB
Kartåsgatan 8, SE-531 40
Lidköping, Sweden
www.hpm.se, info@hpm.se


37340077902123

EID032

Pill Straw 10-p

REF 300701

LOT 240821 13:59

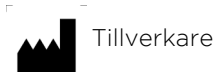
 


Hammarplast Medical AB
Kartåsgatan 8, 531 40 Lidköping, Sweden
info@hpm.se


3 400779 021225

Vers: 1/2023-12

Symboler



Tillverkare



Biocirkulär råvara (ISCC massbalans-attribuerad).

REF Referensnummer

LOT Batch/LOT-number

Hammarplast Medical AB
Kartåsgatan 8
SE-531 40 Lidköping, Sweden

Tel +46 (0)510-618 80
www.hpm.se

HpmTM